

Firmware Update


explore 5




Firmware Update auf der explore 5

Aktuelle Firmware herunterladen bei Humanware

- Öffne die Supportseite von Humanware:
<https://support.humanware.com/en-europe/support/explore>
- Finden und klicken Sie auf den Link explore 5 Version X.X.X.

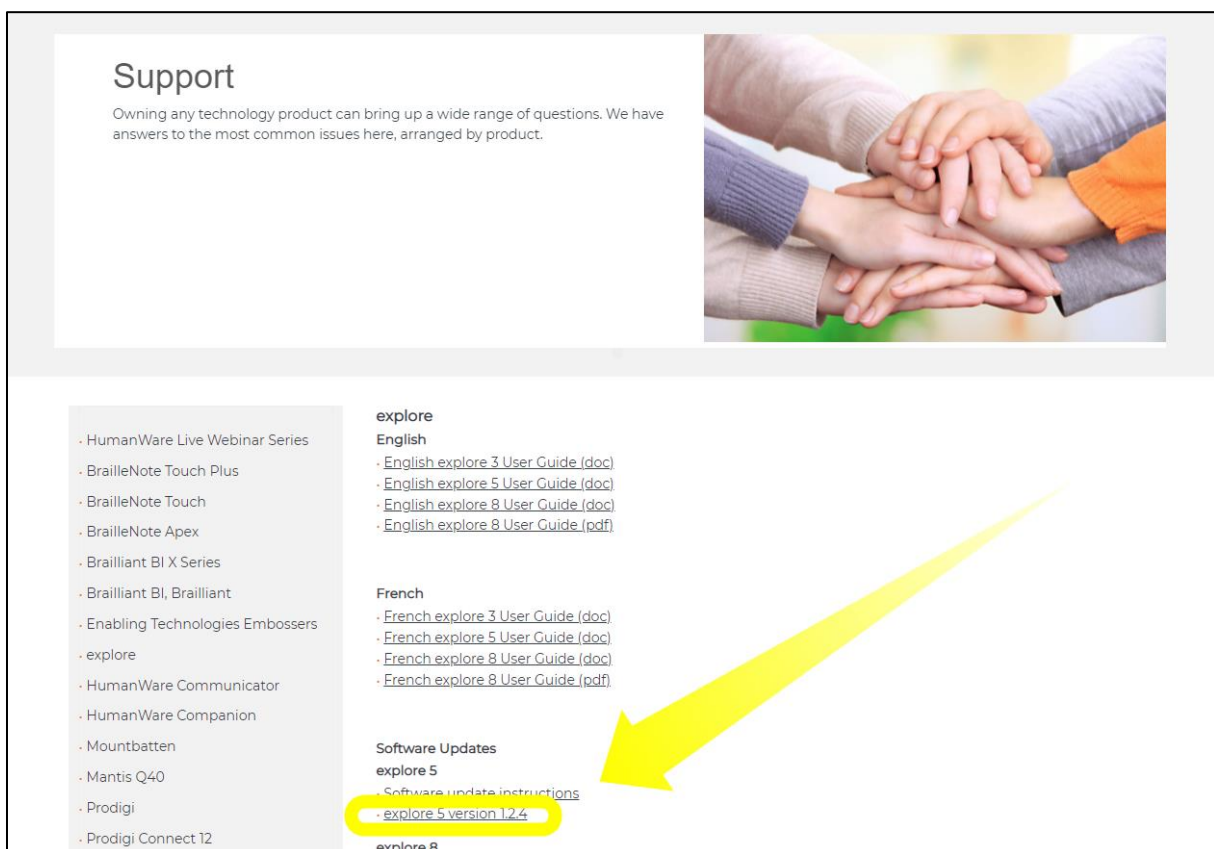

Support
Owning any technology product can bring up a wide range of questions. We have answers to the most common issues here, arranged by product.



- HumanWare Live Webinar Series
- BrailleNote Touch Plus
- BrailleNote Touch
- BrailleNote Apex
- Brailliant BI X Series
- Brailliant BI, Brailliant
- Enabling Technologies Embossers
- explore
- HumanWare Communicator
- HumanWare Companion
- Mountbatten
- Mantis Q40
- Prodigy
- Prodigy Connect 12

explore
English
· [English explore 3 User Guide \(doc\)](#)
· [English explore 5 User Guide \(doc\)](#)
· [English explore 8 User Guide \(doc\)](#)
· [English explore 8 User Guide \(pdf\)](#)


French
· [French explore 3 User Guide \(doc\)](#)
· [French explore 5 User Guide \(doc\)](#)
· [French explore 8 User Guide \(doc\)](#)
· [French explore 8 User Guide \(pdf\)](#)

Software Updates
explore 5
· [Software update instructions](#)
· [explore 5 version 1.2.4](#)


explore 8

Explore 5 mit PC verbinden


- Verbinden Sie die explore 5 mit dem Ladekabel und dem PC und finden Sie die Datei im Explorer

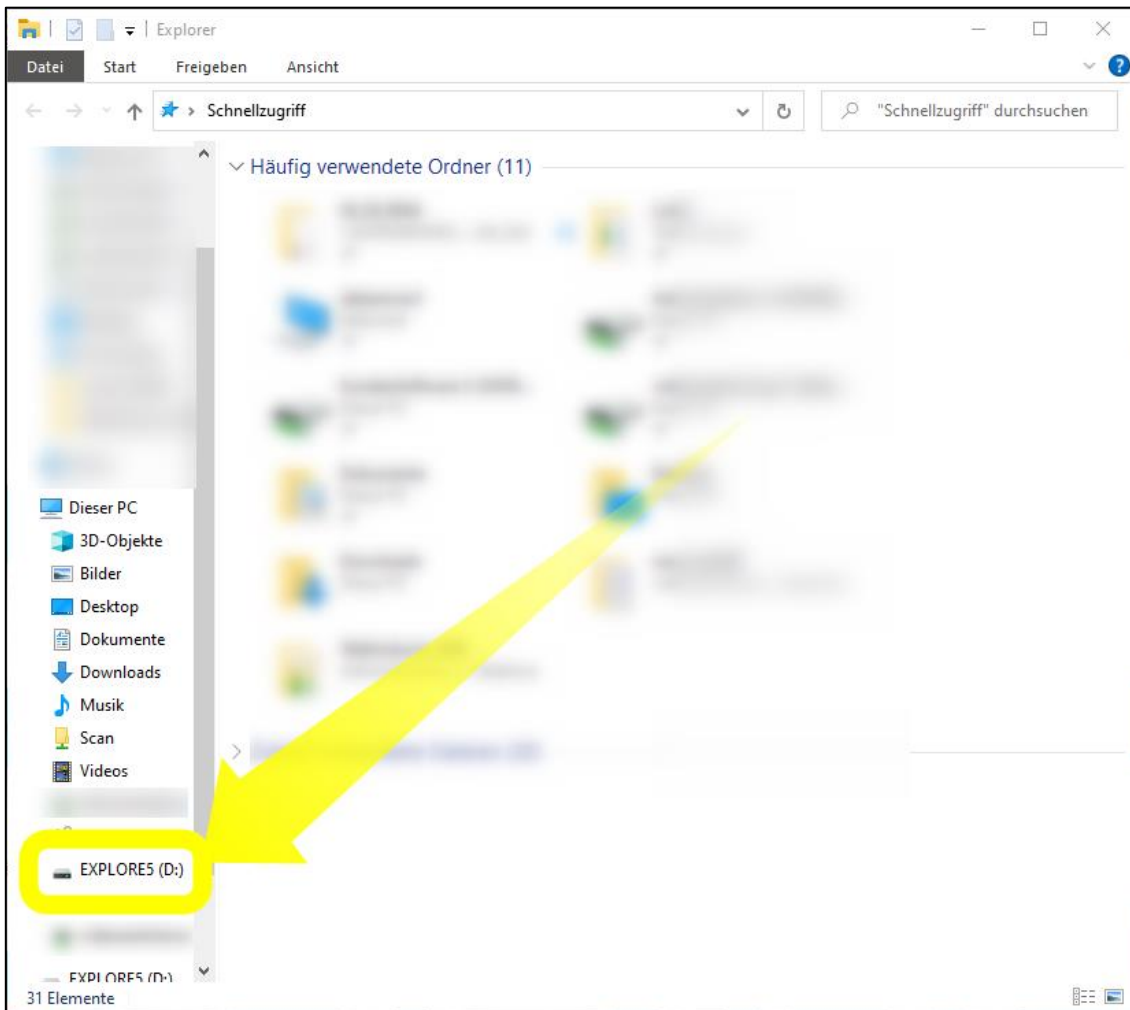


- Es ist nur der Ordner « Images » vorhanden

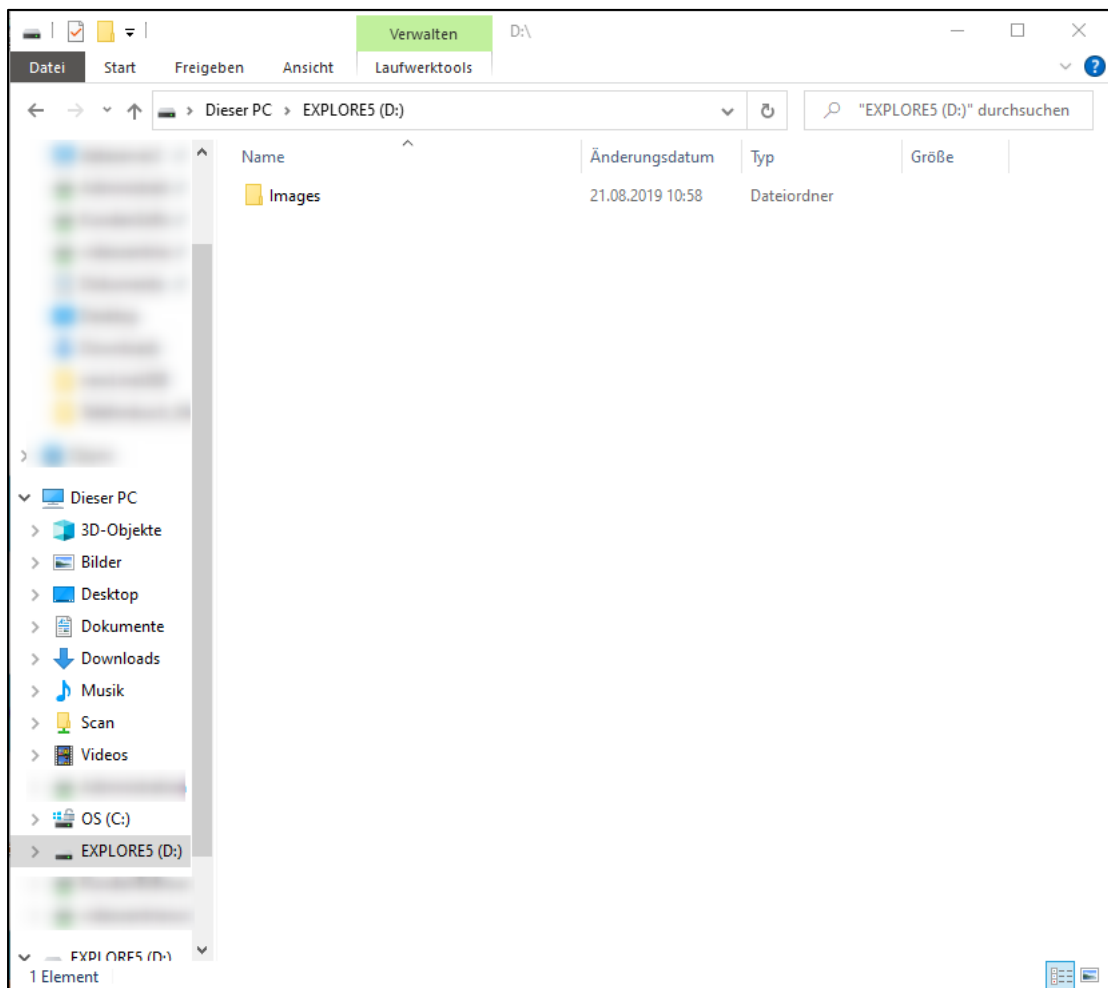

- Gehen Sie in den Download-Ordner und kopieren Sie die Update-Datei explore 5....BRN

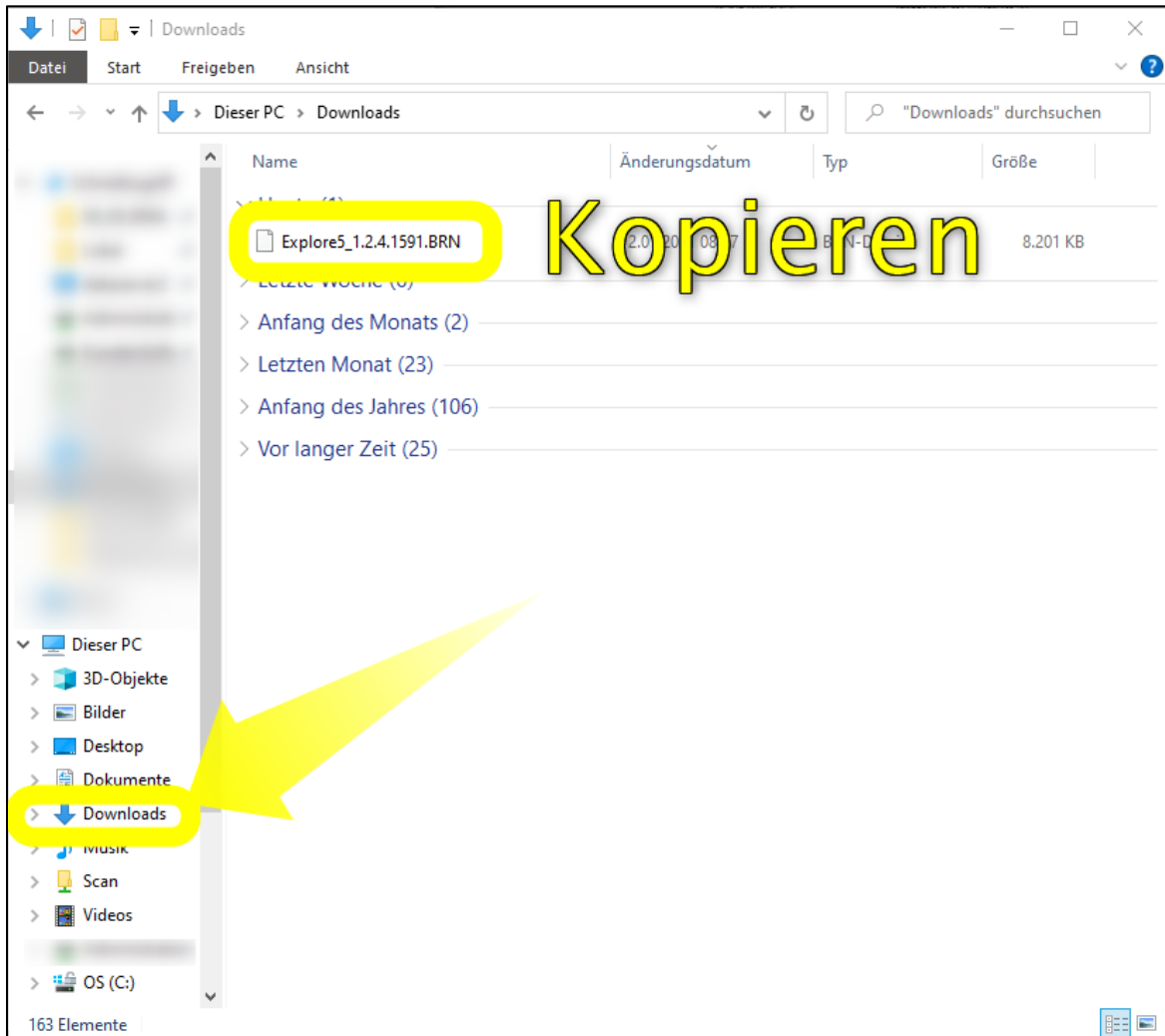

- Fügen Sie die Datei auf dem explore 5 Gerät ein.

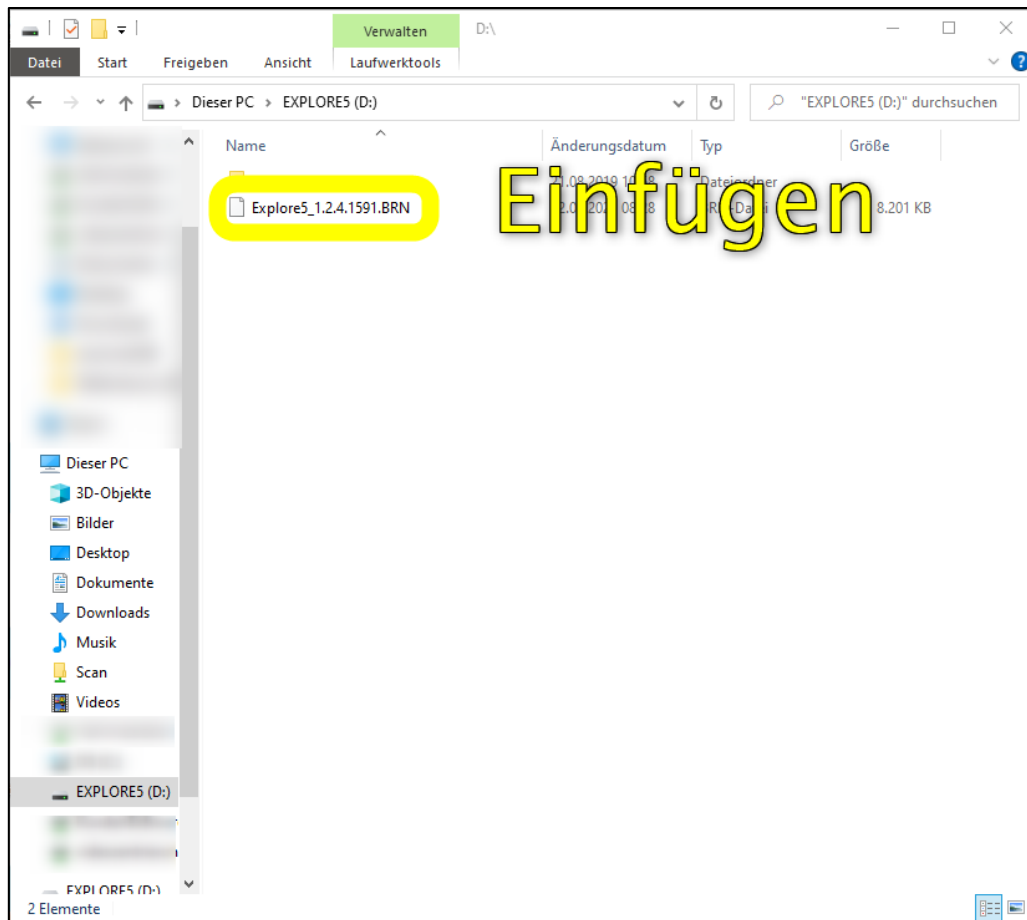

Explore 5 neu starten durch Aus-/Einschalten

- Es wird der Text „Firmware Aktualisierung“ angezeigt
- Sobald das Update fertig ist, wechselt die Lupe in den normalen Betrieb. Fertig.

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unser Serviceteam
montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr
unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-216
oder

E-Mail: lowvision@visuSolution.com



Because
your
vision
matters