

Firmware Update


explore 8



Firmware Update auf der explore 8

1. Aktuelle Firmware herunterladen bei Humanware


- Öffnen Sie die Supportseite von Humanware:
<https://support.humanware.com/en-europe/support/explore>
- Finden und klicken Sie auf den Link explore 8 Update Files

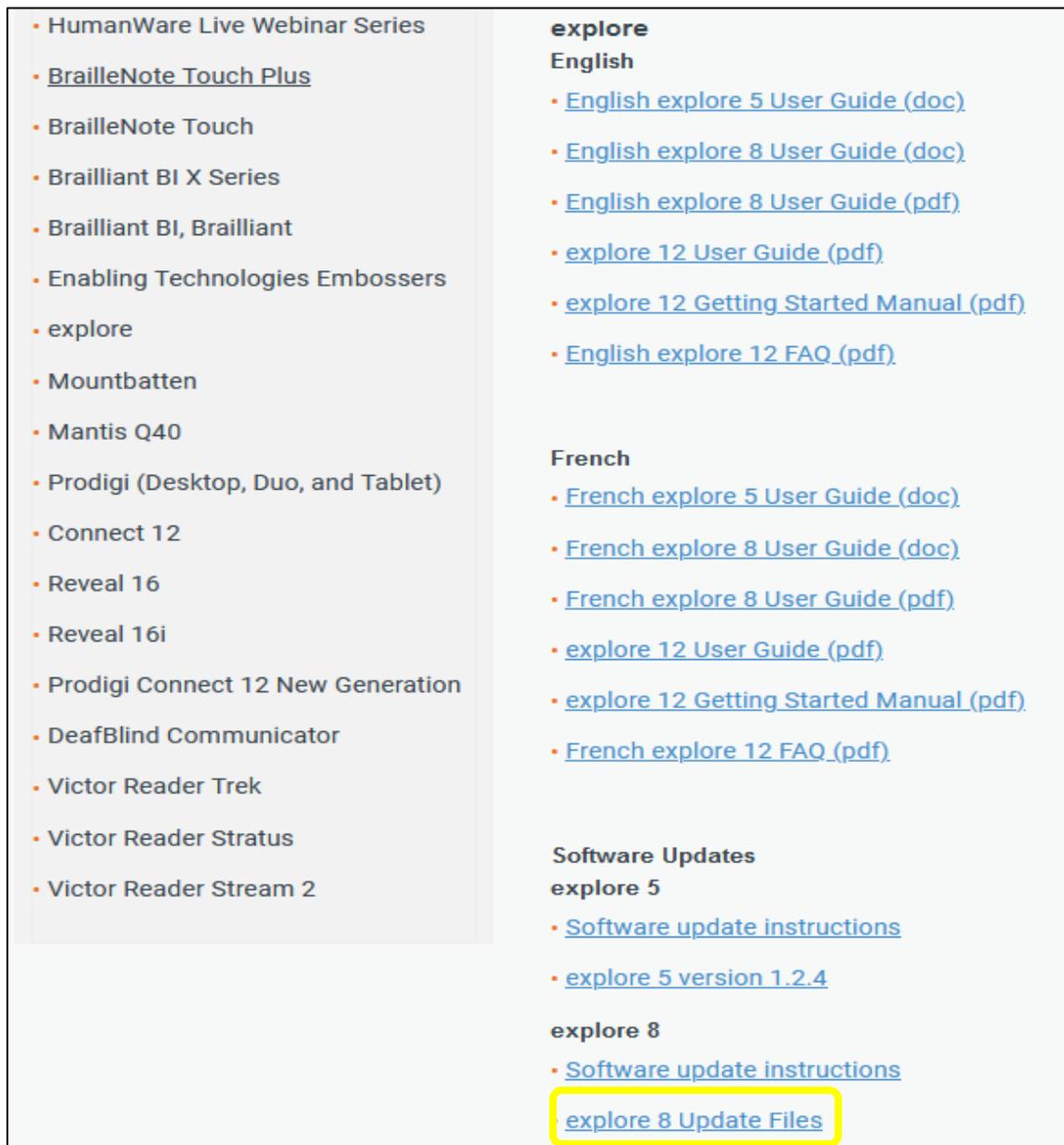


The screenshot shows a support page with a navigation menu on the left and a list of links on the right. The navigation menu includes categories like 'HumanWare Live Webinar Series', 'BrailleNote Touch Plus', 'BrailleNote Touch', 'Brailliant BI X Series', 'Brilliant BI, Brailliant', 'Enabling Technologies Embossers', 'explore', 'Mountbatten', 'Mantis Q40', 'Prodigi (Desktop, Duo, and Tablet)', 'Connect 12', 'Reveal 16', 'Reveal 16i', 'Prodigi Connect 12 New Generation', 'DeafBlind Communicator', 'Victor Reader Trek', 'Victor Reader Stratus', and 'Victor Reader Stream 2'. The right side of the page is titled 'explore' and is divided into sections for 'English', 'French', and 'Software Updates'. Under 'English', there are links for 'English explore 5 User Guide (doc)', 'English explore 8 User Guide (doc)', 'English explore 8 User Guide (pdf)', 'explore 12 User Guide (pdf)', 'explore 12 Getting Started Manual (pdf)', and 'English explore 12 FAQ (pdf)'. Under 'French', there are links for 'French explore 5 User Guide (doc)', 'French explore 8 User Guide (doc)', 'French explore 8 User Guide (pdf)', 'explore 12 User Guide (pdf)', 'explore 12 Getting Started Manual (pdf)', and 'French explore 12 FAQ (pdf)'. Under 'Software Updates', there are sections for 'explore 5' and 'explore 8'. The 'explore 8' section has links for 'Software update instructions' and 'explore 8 Update Files', which is highlighted with a yellow box.

2. Explore 8 mit PC verbinden

- Verbinden Sie die explore 8 mit dem Datenkabel und dem PC und finden Sie den Datenträger im Explorer

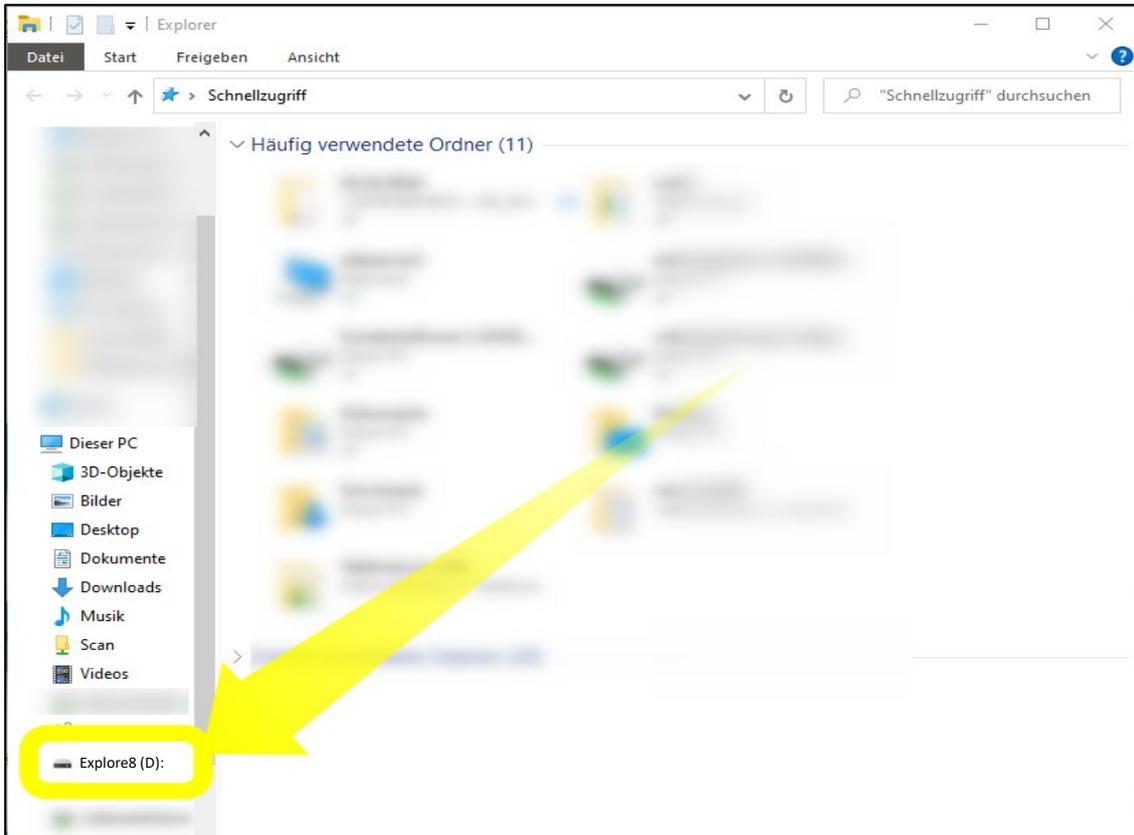


- Es ist nur der Ordner « Images » vorhanden

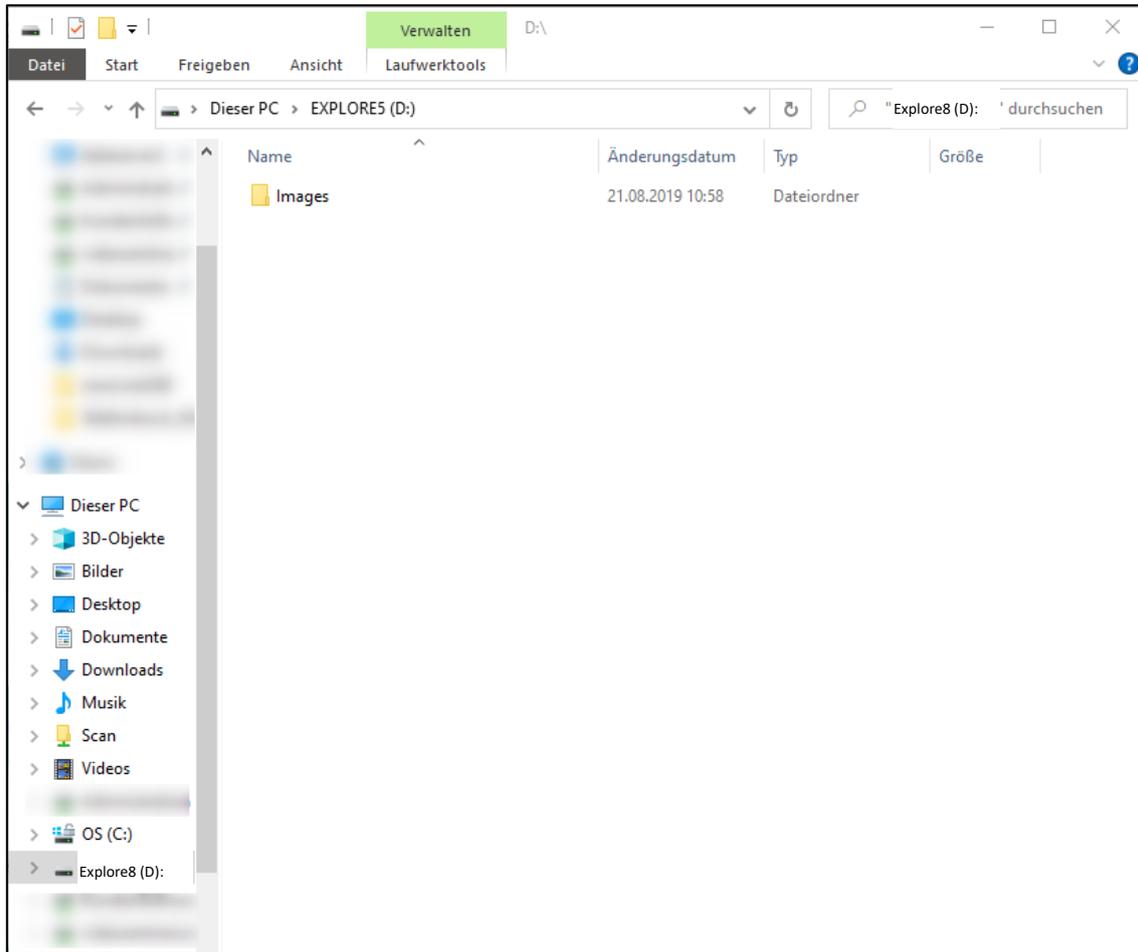


3. Update-Dateien auf Datenträger kopieren

- Gehen Sie in den Download-Ordner und kopieren Sie die beiden Update-Dateien explore 8...BRN aus dem Zip-Ordner

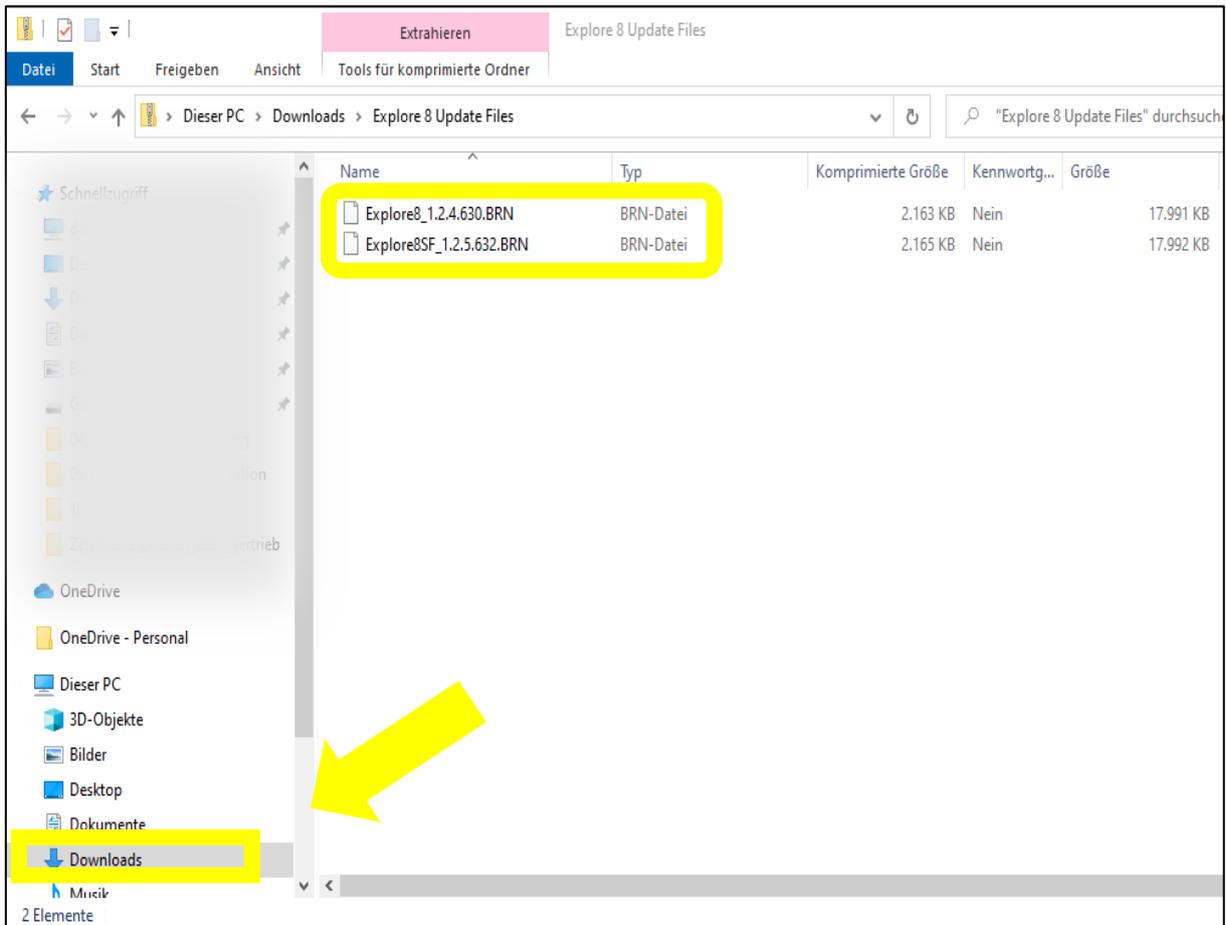

- Fügen Sie die Datei auf dem explore 8 Datenträger ein und trennen Sie das Datenkabel vom Gerät.

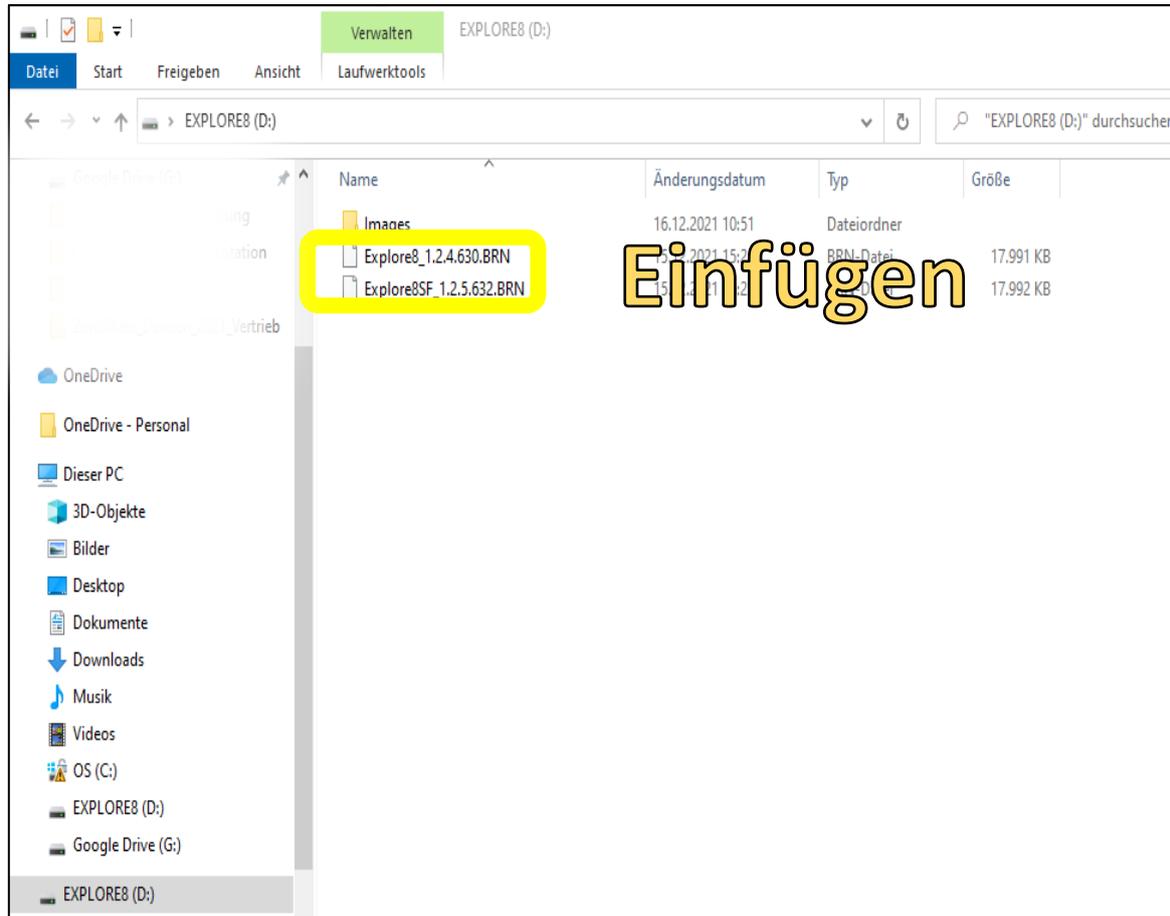

4. Explore 8 neu starten durch Aus-/Einschalten

- Es wird der Text „Firmware Aktualisierung“ angezeigt
- Sobald das Update fertig ist, wechselt die Lupe in den normalen Betrieb. Fertig.

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unser Serviceteam
montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr
unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-216
oder

E-Mail: lowvision@visuSolution.com



Because
your
vision
matters