



LED Beleuchtung einstellen

explore 8





LED-Beleuchtung bei der explore 8 einstellen

Menü öffnen

• Drücken und halten Sie die Kontrasttaste, um das Menü zu öffnen.

	Нитайшаге	
1	Menü	
	Galerie	
	Autofokus: Manuell	
	Bildschirmhelligkeit: 8	
	Touch-Screen	

- Navigieren Sie mit dem Touchscreen durch Scrollen nach unten, bis Sie den Menüpunkt "Lichter" finden.
- Öffnen Sie diesen Menüpunkt mit der Touchfunktion.

	Humanware		
\bigcirc	Menü		
Lichter: A	n		>
Menütextg	röße: Mittel		>
Sprache: I	Deutsch		>
Anzeige: 5	50 Hz		>
-		+	J



• Wählen Sie die gewünschte Einstellung und aktivieren Sie diese mit der Touchfunktion. Es erscheint ein Haken neben der gewählten Option.

Humanware	
Lichter	
	+
	Humanware Lichter

• Verlassen Sie das Menü durch Drücken und Halten der Kontrast-Taste **oder** durch Drücken auf den "Zurück"-Pfeil.

	Humanware	
	Lichter	
An		
Niedrig		
Aus		
-		+



• In unserem Beispiel ist die LED nun abgeschaltet



Haben Sie Fragen?

Sie erreichen unser Serviceteam montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter

Telefon: +49 (0) 39361-967-216 oder

E-Mail: lowvision@visuSolution.com

Because YOUI VISION matters.